



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Hospi.Care
Nitrilhandsker



Beskrivelse

Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)
Pudderfri
Usteril
Blå
Mikroteksturerede fingerspidser
Med rullekant
Kan autoklaveres
Godkendt til håndtering af fødevarer
Produceret for Abena A/S, DK, i Malaysia under ISO 9001

CE

Dual CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC, klasse I og 89/686/EEC klasse I, kat. III
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4
EN 374-1 (Eksklusiv paragraf 5.3)
EN 374-2
EN 374-3 (Testmetoden anvendt til test af kemisk gennemtrængningstid som angivet i nederst i dette datablad)
EN 388 (0,0,0,0)
EN 420

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:	
Før belastning	9 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden	6 Newton

Strækkevne:	
Før belastning	min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 400%



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Forpakning

100 stk. pr. æske (XXL 90 stk)
10x100 stk. pr. karton
48 kartoner pr. palle

Tykkelse

Håndfladen	0,10 mm	(+/- 0,02)
Fingrene	0,12 mm	(+/- 0,02)
Håndled	0,07 mm	(+/- 0,02)
Vægt medium	4,70 g	(+/- 0,4)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
Xsmall	290423	5-6	76	240
Small	3958	6-7	86	240
Medium	3959	7-8	98	240
Large	3960	8-9	107	240
Xlarge	3961	9-10	115	240
Xxlarge	3945	10-11	124	240

Test udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Brudstyrke
Mikrobiologi
Penetration
Pudderrester
Virus penetration
Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)
Kemikalie og cytostatika gennemtrængning (se liste)

Sammensætning

Kemikalie	CAS
Nitrile	-
Titanium Dioxide	13463-67-7
Zinc oxide	1314-13-2
Svovl	7704-34-9
ZDBC	136-23-2
Ammonium	1336-21-6
Anti-oxidant	68610-51-5
Calcium Stearat	1592-23-0
Calcium Nitrate	10124-37-5
T2227 Blue	111-46-6
PL1508 Blue	147-14-8
Klorin	7782-50-5



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS- nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
2-Hydroxyethyl methacrylate 97%		20 min.	1
1,2 dichloroethana		<1 min	0
Acetonitrile 99%	75-05-8	<1 min	0
Acrylamide 40%	79-06-1	>480 min.	6
Ammoniak 25%		13 min	1
Benzoyl Peroxide 2%		>240 min.	5
Bacillol AF		10 min	0
Bomix plus 1%		>480 min	6
Chloroform		<1 min	0
Citron syre 15%		>480 min.	6
Cyclohexane		7 min	0
Cyclohexanol	108-93-0	107 min	3
Diurethane dimethacrylate		>240 min	5
Dichloromethane 99%	75-092	<1 min	0
Diethylamine	109-89-7	<1 min	0
Disozon pur 4%		>480 min	6
Eddikesyre 10%		241 min	5
Ethanol 70%		>480 min.	6
Ethanol 80%		11 min	1
Ethidium bromid 0,1%		>480 min.	6
Ethyl Acetat 99%	141-78-6	<1 min	0
Formaldehyd 35%		>480 min.	6
Formaldehyd 36,5-38%		>240 min.	5
Formaldehyd 37% i Methanol 10%	50-00-0	>60 min	3
Formalin 10%		406 min.	5
Fosforsyre 30%	7664-38-2	>480 min	6
Glutaraldehyd 10%	111-30-8	>480 min	6
Hexane		>480 min.	6
Hydrogen peroxide 30%		>480 min.	6
Iodine løsning 0,5M	7553-56-2	>480 min	6
Isopropanol		>480 min.	6
Kalium hydroxide 30%	1310-58-3	>480 min	6
Klorhexidine 4%		>480 min.	6
Klorin 1.000 ppm		>480 min.	6
Kohrsolin extra 0,5%		>480 min	6
Kohrsolin FF 0,5%		>480 min	6
Korsolex extra 4%		>480 min	6
Korsolex med AF 1%		>480 min	6
Korsolex plus 3%		>480 min	6
Methyl Methacrylate		< 1 min.	0
N-heptane	142-82-5	7 min	0
N-propanol		4 min	0
Natrium hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min.	6
Natrium karbonat 5%		>480 min.	6
O-xylene 99%	95-47-6	<1 min	0
Petroleum destilleret		7 min	0
Perchloric syre 70%		<99 min	3
Phenol 90%		9 min	0
Povidone iodine 10%	25655-41-8	>480 min	6



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Salpetersyre 10%	7697-37-2	>480 min.	6
Saltsyre 25%	7674-01-0	134	4
Saltsyre 36%	7647-01-0	>30 min	2
Svovlsyre 50%		>480 min	6
Svovlsyre 96%		7 min	0
Toluene		<1 min	0
Triethylene glycol dimethacrylate		23 min	1
Cytostatika			
5-Flourouracil – 50.000 ppm		>480 min	6
Carmustine 3.300 ppm		136,60 min.	3
Cisplatin 1.000 ppm		>480 min.	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min.	6
Dacarbazine 10.000 ppm		>480 min.	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min.	6
Epirubincin 2.000 ppm		>480 min	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min	6
Methotrexate 25.000 ppm		>480 min.	6
Mitomycin C 500 ppm		>480 min.	6
Mitoxantrone 2.000 ppm		>480 min	6
Paclitaxel (Taxol) 6.000 ppm		>480 min.	6
Thio-Tepa 10.000 ppm		>480 min.	6
Vincristine Sulfate 1.000 ppm		>480 min.	6
Antibiotika			
Cefuroxim 15.000 ppm		>480 min.	6
Dicloxacinil 10.000 ppm		>480 min.	6
Gentamicin 1.200 ppm		>480 min.	6

Anvendt testmetode: EN374-3



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi ^{*1}	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber ^{*2}	✓	%	%
Rengøring ^{*3}	✓	✓	✓
Fødevareregodkendt ^{*4}	✓	✓	✓

SK114/DK/12.2014

^{*1} Specifikke cytostatika test er anført på databladet. ^{*2} Olieholdige cremer og sæber.

^{*3} Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. ^{*4} Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed 3 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges